

バッテリー取付け・交換方法


準備するもの

1 AED本体


AED-9100
9110
9200



AED-9231

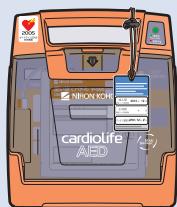

AED-1200

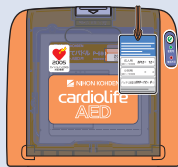

2 取付け・交換用バッテリー

リチウムバッテリー
(AED-9100/9110/9200/9231 用)



バッテリーパック
(AED-1200 用)




3 バッテリー使用開始日ラベル

バッテリー装着日 年 月 日


1 使用済みのバッテリーを本体から取り外す

■ ラッチを押して取り外します。


AED-9100/9110/9200

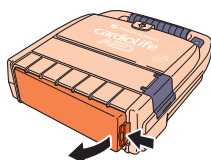

AED-9231

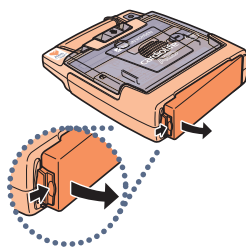


AED-1200

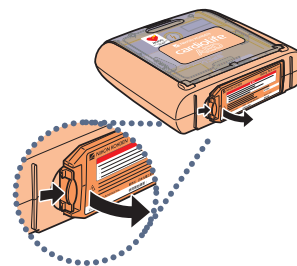


2 新しいバッテリーを取り付ける

1 図の向きにバッテリーコネクタ部を差し込みます。 2 ラッチがロックするまで押し込みます。


AED-9100/9110/9200

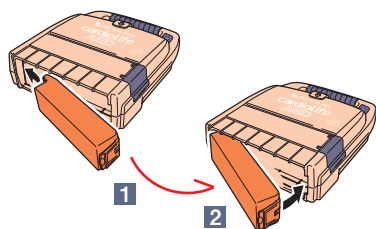

AED-9231

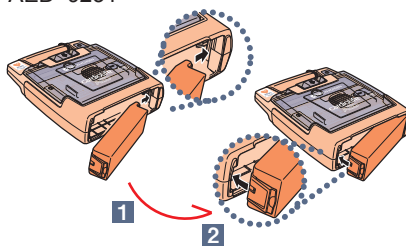

AED-1200

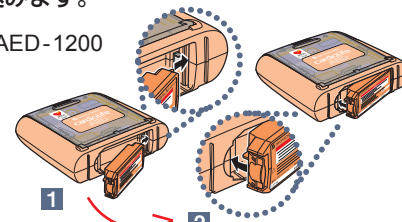


※AED-1200 は、バッテリーパックのラベルに使用開始日を記入します。


3 フタを開閉してセルフテストを行う

1 フタを開けます。 2 音声ガイドが流れることを確認して、フタを閉めます。


AED-9100/9110/9200

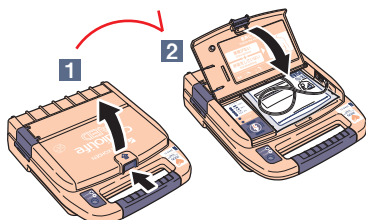

AED-9231

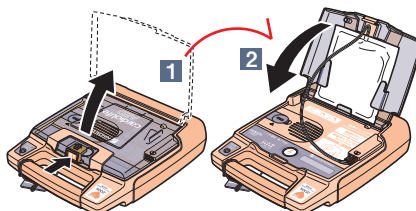

AED-1200

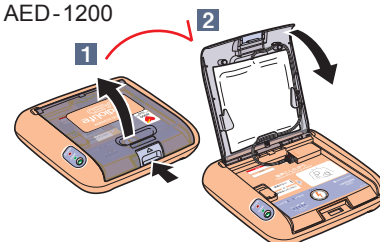


バッテリー取付け・交換方法


4 ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認する



ステータスインジケータ

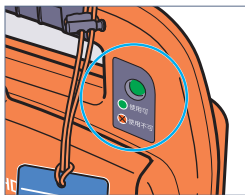

AED-9100/9110/9200

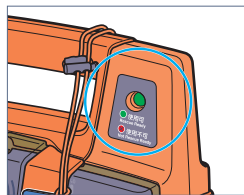


AED-9231





AED-1200

5 バッテリー使用開始日ラベルをAED日常点検タグに貼り付ける


- バッテリーの使用開始日をラベルに記入し、AED日常点検タグに貼ります。

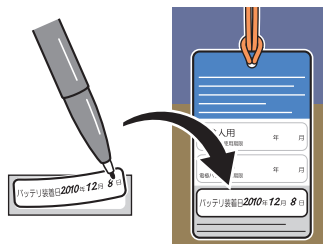

6 各収納ケースに設置する

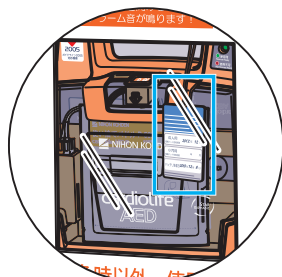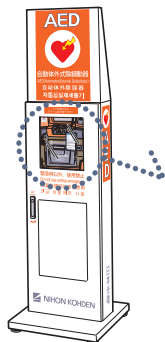

収納ケース

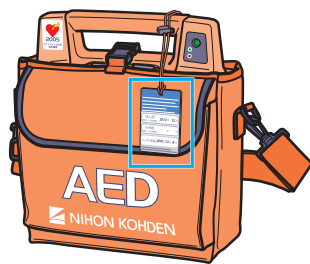

AED用キャリングバッグ

注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

7 AEDの日常点検

- 取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。

点検表は、当社ホームページ
<http://www.nihonkohden.co.jp/aed/dailycheck.html>
からもダウンロードできます。
必要に応じてご使用ください。

■ 使用済みのバッテリーの廃棄について

使用済みのバッテリーは当社にて回収を行っております。
バッテリーを購入いただきました当社営業員・販売店に
お渡しいただくか、下記宛先までご送付ください。
※ 送付費用はお客様のご負担にてお願いいたします。

バッテリー送付先

〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6-2-20
日本光電工業株式会社 用品事業本部 物流センタ
TEL : 049-272-4506

< 梱包時の注意点 >

- * 梱包箱に「使用済みAEDバッテリー」と明記してください。
- * 送付の際には、ショート防止のため、バッテリーの端子部分にテープなどを貼付し、絶縁してください。
- * リチウムバッテリーは、ニッカドや鉛電池などとは廃棄方法が異なるため、他製品のバッテリーとは一緒に梱包しないでください。
- * 梱包箱は、厚手のダンボールなど、破れにくい箱を利用してください。

日本光電

<http://www.nihonkohden.co.jp/>

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560

☎ (03)5996-8000 (代表) Fax.(03)5996-8091

AED保守受付センタ 0120-233-821