


バッテリー取付け・交換方法

AED-3100

注意 使用済み／使用期限切れのバッテリーは、すみやかに交換してください。

準備するもの

1 AED本体

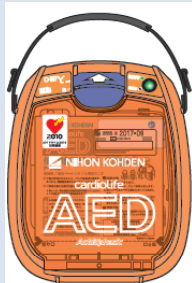


2 取付け・交換用バッテリー



バッテリーパック
SB-310V

3 バッテリー使用開始日ラベル

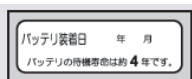

1 使用済みのバッテリーを本体から取り外す

ラッチを押してゆっくり取り外します。

※バッテリーパックの取り外しは、必ずフタを閉じて電源を切り、5秒以上経過してからゆっくり行ってください。
データが正しく保存されなかったり、ステータスインジケータが正しく動作できない場合があります。



2 新しいバッテリーを取り付ける

※バッテリーパックのラベルに使用開始日を記入します。

注意

バッテリーの取付けは、AED本体のフタを閉じて電源を切った状態で行ってください。

1 図の向きにバッテリーコネクタ部を差し込みます。



2 ラッチがロックするまで押し込みます。




カチッと音がするまで

3 ステータスインジケータを確認する

ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認します。

※バッテリーパックを取り付けると、「ピヨッ」と認識音が鳴り、約15秒後にステータスインジケータが緑色に変わります。

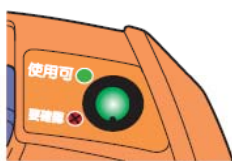

■ 使用済みのバッテリーの廃棄について

使用済みのバッテリーは当社にて回収を行っております。バッテリーを購入いただきました当社営業員・販売店にお渡しいただくか、下記宛先までご送付ください。
* 送付費用はお客様のご負担にてお願いいたします。

バッテリー送付先

〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見 6-2-20
日本光電工業株式会社 用品事業本部 物流センター
TEL: 049-272-4506

<梱包時の注意点>

- * 梱包箱に「使用済みAEDバッテリー」と明記してください。
- * 送付の際には、ショート防止のため、バッテリーの端子部分にテープなどを貼付し、絶縁してください。
- * リチウムバッテリーは、ニッカドや鉛電池などとは廃棄方法が異なるため、他製品のバッテリーとは一緒に梱包しないでください。
- * 梱包箱は、厚手のダンボールなど、破れにくい箱を利用してください。

4 バッテリー使用開始日ラベルを貼り付ける


バッテリーの使用開始日をラベルに記入し、設置管理タグに貼ります。



5 各収納ケースに設置する

注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

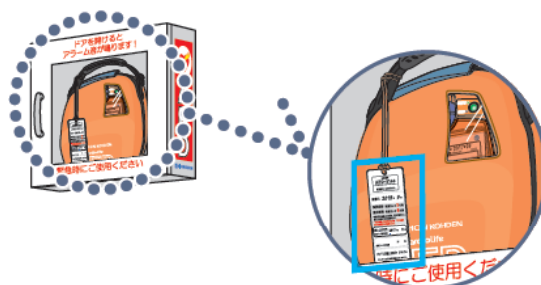

6 AEDの日常点検

取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。

点検表は、当社ホームページ

<http://www.aed-life.com/nihonkohden/dailycheck.html>

からもダウンロードできます。必要に応じてご使用ください。

