

注意 使用済み／使用期限切れの電極パッドはすみやかに交換し、新しい電極パッドを接続してください。

準備するもの

1 AED




※イラストは AED-3100 です。

2 電極パッド



1 パッドの使用期限シールを貼り付ける

■ 新しい使用期限シールを
設置管理タグに貼ります。

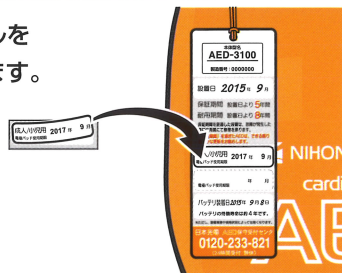

2 フタを開ける

■ 電源スイッチを手前にスライド
させてフタを開けます。
フタを開けると自動的に
電源が入り、音声ガイドが
聞こえます。



3 古い電極パッドを取り外す

■ コネクタ両側のつまみを
持ち、スライドさせて
引き抜きます。



4 新しい電極パッドを接続する

1 コネクタの凹凸を
合わせて差し込みます。

※ コネクタ部の溝にほこり
などが付着していないことを
確認してください。



2 カチッと音がして
ロックがかかるまで
コネクタをスライド
させます。



■ 使用済み／使用期限切れの電極パッドの 廃棄について

- ① 使用している場所が医療機関の場合
使用済み／使用期限切れの電極パッドは、シートとパッケージ
も含めて、医療廃棄物として専門業者に依頼し、速やかに廃棄
してください。
- ② 使用している場所が医療機関以外の場合
各自治体の指示に従って速やかに廃棄してください。


5 電極パッドを収納し、フタを閉じる

(電極パッドのケーブルをフタにはさまないように注意します。)

1 電極パッドをフタに収納し、
ケーブルをケーブルガイド
(3カ所) にセットします。



2 フタを閉じて
ロックします。
※ 電源スイッチをカチッと
音がするまで奥にスライド
させます。

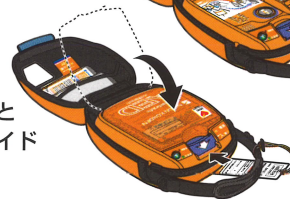

6 ステータスインジケータを確認する

■ ステータスインジケータが
緑色(使用可)であることを
確認します。



7 設置する

注意

AEDを設置する際は、電極パッドの使用期限とバッテリーの
使用開始日の表示が、必ず見えるように設置してください。



収納ケースに設置する場合

単体で設置する場合

8 AEDの日常点検

■ 取扱説明書にある点検表を使用して、
AEDの日常点検を実施します。
点検表は、当社ホームページ
[http://www.aed-life.com/
nihonkohden/dailycheck.html](http://www.aed-life.com/nihonkohden/dailycheck.html)
からもダウンロードできます。
必要に応じてご使用ください。

