
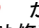



LIFEPAK 自動対外式除細動器(AED)
点検担当者用メンテナンスシート

日本メドトロニック㈱ライフパックAEDは下の写真の3機種です。該当する機種にチェックを入れてください。
※本書は、毎日あるいは使用後に本装置を検査、点検する際に利用するチェックリスト例です。(複製可)

装置製造番号(S/N)

点検担当者 _____
Year/ Month 20 年 月

点検箇所	推奨する解決方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1、画面に「OK」インディケータが表示されている。	AEDが使用できる状態です。 ※バッテリーマーク  や注意マーク  レンチマーク  が表示されている場合は、バッテリー交換や修理を必要とするため、販売店に連絡してください。																																	
2、装着されている電極、予備用電極、すべての電極の使用期限を確認	使用期限内であれば引き続きご使用ください。 ※使用期限が切れている場合は、交換を必要とするため、販売店に連絡してください。																																	
3、損傷またはヒビ、異物の付着の有無	損傷またはヒビなどがある場合は、故障の原因となる場合がありますので、販売店にお問い合わせください。 異物の付着がある場合は、イソプロピルアルコール又は過酢酸溶液を利用して、湿ったスポンジや布で拭き取ってください。																																	

【注意時項】バッテリー寿命に関しては、使用頻度、保管環境(温度)、自動セルフテストの状況によって異なります。上記のインディケータ確認・メンテナンスに関しては取扱説明書をご確認下さい。
又、各種消耗品使用期限についての表示ラベル記入方法・取付方法に関しては、日本メドトロニック㈱専用サイト(<http://www.medtronic-lifepak.com/>)にてご確認ください。

ライフパックCRプラス

ライフパック500

ライフパック1000

