



Paramedic CU-ER1定期点検表

点検項目		
1	外観	AEDに傷がありますか？
		-破損したり、亀裂が発生していませんか？
		-ボルトが外れていませんか？
2	基本動作	エラーランプが点灯していますか？ *インジケータのエラーランプが赤色に点灯していたら、販売店もしくはコールセンターに問合せしてください。(但し:下記の場合を除く) -ERRORCODE「0001」発生時:ACアダプタ(充電器)で充電してください。 -ERRORCODE「2048」発生時:マニュアル自己診断を行ってください。(進行中のボタンの操作は10秒以内)
		電源を入れた時、正常にインジケータと液晶画面が作動しますか？ 1.電源ボタン(緑色)を押して電源を入れる。 2.緑色の電源ボタンが点灯、液晶画面に「STARTING UP」と表示され、ショックボタンが赤色に1度点灯し、消える。 3.液晶画面に「電極パッドを装着してください」という文字と音声指示が出ます。 4.インジケータはバッテリーランプだけが緑色で点灯し、他は点滅も点灯もしまし。 5.緑の電源ボタンを押して電源を切る。
3	バッテリー	バッテリーの残量は充分ですか？
		充電は充分ですか？(バッテリーの残量は50%以上残っていますか) *3ヶ月毎にフル充電(3~4時間)しましたか？ -充電終了時には、インジケータのバッテリーランプは緑色に点灯します。 -液晶画面にバッテリー残量が、右図のようにフル充電表示されていますか？ 
4	電極パッド	右図のように電極パッドの有効期間が1ヶ月以上残っていますか？  2011年05月まで
5	動作環境	AEDの設置場所の温度は0 ~ 40 ですか？

***緊急時(使用時には119番に電話してください)**

*詳しいAEDの使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

*点検の結果、AEDに異常がある場合には販売店、もしくはコールセンターにお問い合わせください。



CU Medical Systems, Inc.
www.cu911.com

コールセンター
フリーダイヤル:0120-910-256

販売店名:
電話番号:
緊急連絡先: